

口もとが良くみえる

# フェイスマスクの作り方

①



①材料

使い捨てマスク

ゼムクリップ

クリアシート

(OHPシートなど)

必要な用具

ホチキス

②




②マスクを2つ折りにしてクリップをホチキスで写真のようにとめます。

ホチキスを止める位置はマスクの外縁部です。

(内側にクリアシートを挟めるようにしておきます)

③

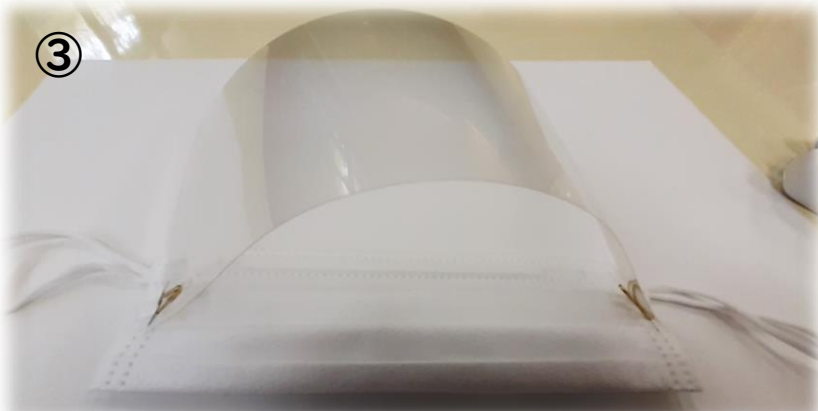

③クリアシートをクリップに挟み込みます。

シートの横幅は、マスクより広めにして、写真のように盛り上がる形にします。

④マスクをあごに当てて、装着します。クリアシートが口元を覆うように、角度を微調整してください。シートは取り外しが容易ですので、汚れたら交換してください。

④



応用例



ゼムクリップで マスクとクリアシートを固定することもできます。